

Uriflex Liberty

Alarme d'énurésie sans fil **Manuel**



Récepteur

Votre solution contre l'énurésie

Émetteur sans fil



Uriflex® Liberty distribution par CHARCO B.V.

€

Manuel alarme d'énurésie Liberty

Félicitations pour l'achat du Liberty ! L'alarme d'énurésie la plus personnalisée avec accompagnement spécialisé devient votre solution contre l'énurésie. Nous sommes fiers d'annoncer que vous avez ainsi également opté pour la formation sur l'alarme d'énurésie la plus appréciée.

Le service d'assistance de Charco est spécialisé depuis 1997 déjà dans les formations pour lutter contre l'énurésie. Nous savons mieux que quiconque qu'une alarme d'énurésie n'est pas la panacée, mais qu'elle peut apporter une aide. Un bon accompagnement pendant la formation sur l'alarme d'énurésie fait généralement la différence entre une expérience décevante et des enfants et parents heureux.

Avec notre approche, environ 92% des utilisateurs se débarrassent de l'énurésie dans les 8 à 12 semaines ! Un résultat sans précédent.

Comment Charco va-t-elle accompagner la formation ?

1. L'emballage contient des cartes de résultats et des feuilles autocollantes. Pour beaucoup d'enfants, c'est une façon stimulante d'enregistrer chaque jour la progression de la formation.
2. Aux clients enregistrés chez Charco, nous envoyons par e-mail des conseils généraux qui, pour de nombreux enfants, ont un effet positif sur la formation. Cela permet d'attendre encore plus vite le résultat souhaité.
3. Vous préférez un contact téléphonique pour discuter de la formation ? Aucun problème ! De plus, c'est gratuit pour les clients enregistrés chez Charco.




Bref, Charco vous aide de différentes manières à atteindre l'objectif. Des nuits au sec !

La formation peut être fatigante les premières semaines, mais tenez bon et suivez les conseils de Charco ou votre consultant. Sans vous en rendre compte, vous réussirez également à maîtriser totalement le sphincter de votre vessie pendant le sommeil.


**Bonne chance, devenez vite maître de votre vessie
pour profiter d'ici peu de nuits au sec !**

L'équipe Charco

Contenu paquet alarme d'énurésie

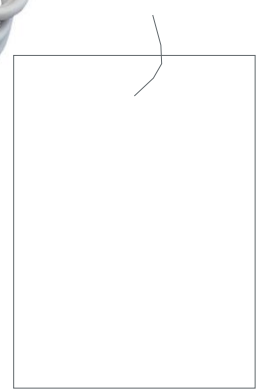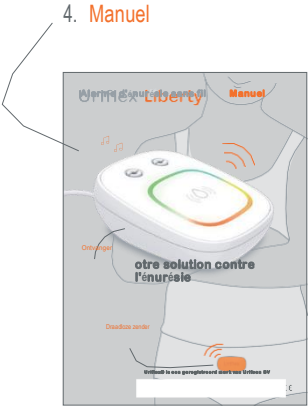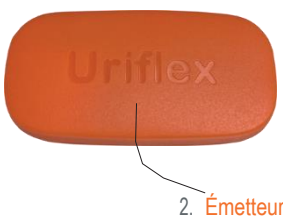

Manuel alarme d'énurésie Liberty

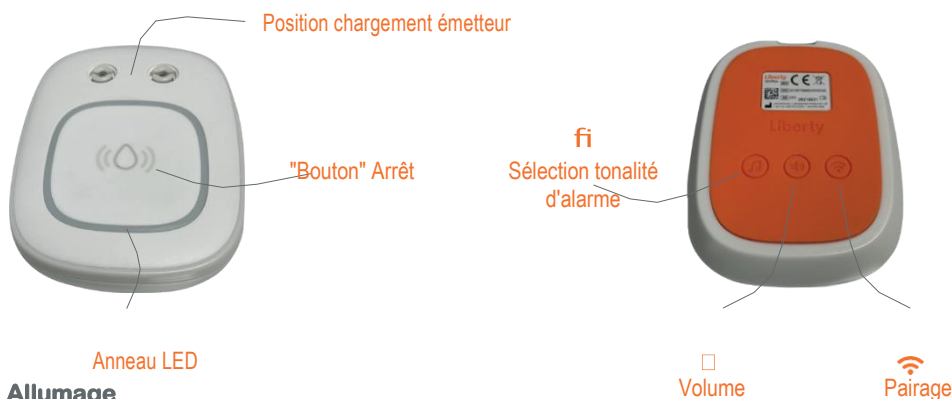

Insérez la fiche aussi bien à l'arrière de l'alarme d'énurésie que dans la prise de courant. Sur le dessus du récepteur de l'alarme d'énurésie, l'anneau LED devient vert.

Recharge de l'émetteur

L'émetteur contient une pile rechargeable. Vous ne devez donc jamais ouvrir l'émetteur. En recevant l'alarme d'énurésie ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, l'anneau LED clignote en rouge. Cela signifie que la pile est déchargée et qu'elle doit être rechargée. Il est très facile de la recharger en clipsant l'émetteur avec les boutons-pression au-dessus du récepteur. Positionnez l'émetteur de manière à ce que le nom Uriflex soit lisible. L'anneau LED vert devient une barre éclairée juste en dessous de l'émetteur. L'éclairage est pulsé pendant la recharge. Lorsque la pile est à pleine charge, la barre reste verte en continu.

Attention ! Si l'émetteur avec le nom Uriflex est clipsé à l'envers sur le récepteur, l'éclairage reste le même et la pile n'est pas rechargée. Retournez l'émetteur de manière à ce qu'Uriflex soit lisible, puis clipsez à nouveau l'émetteur sur le récepteur. La procédure de recharge commence.

Conseil ! Le matin, retirez toujours l'émetteur de la culotte à capteur et clipsez-le sur le récepteur ! Ainsi, vous avez toujours une pile à pleine charge et cela vous évite aussi de laver accidentellement l'émetteur, qui ne le supporte pas.

Test de l'émetteur

L'alarme se déclenche lorsqu'un objet métallique, par exemple un trombone ou des ciseaux, est pressé simultanément sur les deux boutons-pression sur l'émetteur orange. Naturellement, le récepteur doit être allumé et la pile de l'émetteur ne doit pas être déchargée.

Connexion culotte à capteur et alarme d'énurésie

L'alarme d'énurésie est prête à l'emploi lorsque le récepteur est branché sur la prise de courant et que l'émetteur chargé est clipsé sur la culotte à capteur (voir image).



Choisissez votre signal d'alarme

Le Liberty offre 10 signaux d'alarme différents. À l'arrière du récepteur, il y a un petit bouton avec l'image d'une note de musique **fi**. Un signal d'alarme est émis en appuyant sur ce bouton. Le signal change en appuyant à nouveau sur le bouton. Maximum 10 signaux différents peuvent ainsi être écoutés. Le dernier signal d'alarme que vous entendez est celui qui est réglé.

Réglage du volume

Appuyer brièvement sur le bouton de volume en dessous du récepteur permet d'entendre le volume tel qu'il est réglé à ce moment-là sur l'alarme d'énurésie. Le volume change en appuyant à nouveau sur le bouton. Le dernier volume entendu est celui qui est réglé.

Connecter un nouvel émetteur au récepteur

L'ensemble récepteur et émetteur est connecté avant l'expédition et aussitôt prêt à l'emploi.

Mais, si après un certain temps, vous allez utiliser un nouvel émetteur (par exemple parce que vous avez perdu l'émetteur précédent), celui-ci doit être connecté ("paire") au récepteur avant utilisation.

Cette opération est très facile en suivant les étapes suivantes :


1. Appuyez sur le symbole "pairage" en dessous du récepteur jusqu'à ce que l'anneau LED clignote en bleu.
2. Avec un stylo ou un trombone, appuyez entre les deux boutons-pression de l'émetteur (voir photo) jusqu'à entendre un bip. Ensuite, l'anneau LED devient vert.

Le récepteur et l'émetteur sont interconnectés et prêts à

l'emploi. Un test peut être réalisé en reliant les deux boutons-pression avec un objet en métal.

Ensuite, l'alarme se déclenche.

Attention : le pairage n'est nécessaire que si vous voulez utiliser un nouvel émetteur avec le récepteur.

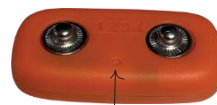

Bouton-pression

Signification des couleurs de l'éclairage LED

Le plus marquant sur l'alarme d'énurésie Liberty, c'est l'éclairage au moyen du grand anneau LED. Cet éclairage est non seulement joli, mais aussi informatif. Quelle est la signification des différentes sortes et couleurs d'éclairage ?



L'émetteur n'est pas clipsé sur le récepteur. L'anneau LED est entièrement éclairé.

Vert en continu = le Liberty est prêt à l'emploi et l'éclairage est une veilleuse.

Rouge en continu = alarme indiquant que le lit est mouillé.

Orange clignotant = l'émetteur doit être rechargé. Rouge clignotant = la pile de l'émetteur est déchargée (solution : rechargez l'émetteur) ou l'émetteur est hors de portée du récepteur (solution : rapprochez-les) ou il y a une panne technique (solution : pairage de l'émetteur au récepteur).

Bleu clignotant = le récepteur est en mode pairage. L'émetteur peut être connecté.



L'émetteur est correctement clipsé sur le récepteur. Barre avec éclairage LED.

Orange pulsé = l'émetteur est en train d'être rechargé. Vert en continu = l'émetteur est entièrement rechargé.

L'anneau LED clignote en rouge = la pile rechargeable est déchargée. La pile s'arrête de clignoter après quelques minutes.



L'émetteur n'est pas correctement clipsé sur le récepteur. L'anneau LED est entièrement éclairé.

L'émetteur est à l'envers et n'est pas rechargé. L'émetteur doit être retourné (Uriflex lisible) pour être rechargé.

Comment utiliser le Liberty

Quand vous allez vous coucher, enfiler la culotte à capteur et clipsez l'émetteur avec les boutons-pression sur la culotte. Insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise de courant, puis positionnez le récepteur à quelques mètres du lit. En effet, il est important que vous quittiez votre lit la nuit pour éteindre l'alarme. Ainsi, vous vous rendez plus vite compte de ce qui se passe et de ce que vous devez faire, car c'est précisément le but recherché.

L'alarme se déclenche...

L'alarme se déclenche dès que, la nuit, vous urinez les premières gouttes dans la culotte à capteur. Normalement, vous vous réveillez immédiatement et arrêtez par réflexe d'uriner. Vous le faites automatiquement en contractant le sphincter de votre vessie et retenez ainsi votre urine. Ensuite, vous sortez du lit, **retirez d'abord l'émetteur de la culotte à capteur, puis désactivez l'alarme** en appuyant sur la goutte sur le dessus du récepteur. Ensuite, allez aux toilettes pour finir d'uriner. Mettez une culotte à capteur sèche et clipsez l'émetteur dessus. Vous pouvez retourner vous coucher 😊

Attention : l'alarme ne peut être désactivée qu'en retirant d'abord l'émetteur de la culotte à capteur humide. Cette action supplémentaire est intégrée pour stimuler la prise de conscience en cas d'alarme.

Important : tout à l'état conscient !

Il est essentiel de réagir vite à l'alarme, d'être vraiment réveillé(e) et conscient(e) de ce qui se passe : vous réveiller, uriner sur les toilettes et enfiler une culotte à capteur sèche. Surtout au début, il est préférable que votre papa, maman ou accompagnateur vienne vous voir lorsque l'alarme se déclenche. Ainsi, vous êtes certain(e) de réagir le plus vite possible et correctement à l'alarme.

Pour les parents/accompagnateurs : réagir immédiatement au signal d'alarme est la clé du succès. Car à ce moment-là, des signaux sont envoyés au cerveau pour indiquer que la vessie est pleine. Avec la formation sur l'alarme d'énurésie, le réflexe nécessaire est stimulé et développé. En utilisant l'alarme d'énurésie chaque nuit, votre enfant se réveillera de lui-même et à temps après quelques semaines seulement.

Chaque matin, enregistrer ensemble le résultat de la nuit écoulée

Pour suivre la progression de votre formation, il faut prendre le temps d'enregistrer chaque matin le résultat de la nuit. Cela peut avoir lieu sur la carte des résultats, où vous pouvez gagner des points et coller chaque jour un autocollant.

Conseil parent/accompagnateur : l'enregistrement de la progression de la formation a généralement un effet motivant. En effet, beaucoup d'enfants aiment coller des autocollants et/ou gagner rapidement un maximum de points. Cela fonctionne très bien, à condition d'y associer une - petite - récompense. Associez cette récompense non seulement au résultat, mais aussi à l'engagement.

En recevant une copie de la carte des résultats entièrement complétée, nous pouvons suivre le déroulement de la formation. Si vous le souhaitez, nous pouvons discuter en personne avec vous (de préférence par téléphone). Suivez nos conseils et/ou contactez-nous si votre enfant ne réagit toujours pas rapidement après 10 jours.

Arrêtez d'utiliser l'alarme d'énurésie après 3 semaines au sec

Il est important de ne pas arrêter trop rapidement d'utiliser l'alarme d'énurésie, car cela augmente le risque de rechute. Arrêtez d'utiliser l'alarme d'énurésie uniquement si, pendant 3 semaines (21 nuits) successives, vous avez dormi des nuits complètes ou vous vous êtes réveillé(e) de vous-même - donc sans alarme - pour aller aux toilettes. Votre formation est un succès lorsque vous n'avez pas uriné dans votre lit au cours des 2 semaines suivantes. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles !

Conseils pratiques pour les parents

- Si votre enfant transpire beaucoup, il est recommandé de lui mettre d'abord une simple culotte, avec la culotte à capteur par-dessus. Ainsi, le signal d'alarme ne se déclenche pas aux premières gouttes d'urine et cela évite des signaux d'alarme inutiles.
- Si l'émetteur se détache de la culotte à capteur pendant le sommeil, nous recommandons d'enfiler une culotte par-dessus la culotte à capteur.
- Le fonctionnement de l'émetteur peut toujours être contrôlé en reliant les 2 boutons-pression sur l'émetteur avec un objet métallique, par exemple des ciseaux. Cependant, veillez à ce que le récepteur soit allumé et que l'émetteur soit (en partie) rechargé.

Garantie

Le Liberty est couvert par une période de garantie de 12 mois après l'achat (date de facture). La garantie s'applique aux défauts de fabrication et matériels, ainsi qu'aux pannes survenues dans des conditions normales d'utilisation, et ce, à la discrétion de Charco BV. La garantie ne s'applique pas aux dégâts des eaux. Charco n'assume aucune responsabilité pour des obligations de garantie autres que celles susmentionnées. Ce n'est que sur présentation du ticket d'achat que le premier acheteur peut avoir recours à la garantie susmentionnée.